

Bécasine



Quoi ?

Une bécasine est un fauteuil tout terrain avec deux roues qui permet les balades en pleine nature (chemin de randonnée accessible, en ville). Il faut être au moins deux personnes valides pour tracter la bécasine. La bécasine se monte et se démonte en quelques minutes, sans outil, pour se ranger dans la plupart des voitures.

Pour qui ?

Pour toutes personnes à mobilité réduite.

Montage

- Dévisser les bras en tournant sur les molettes noires
- Placer le bras avant (écriture « Bécasine vers l'extérieur ») à l'intérieur de l'assise en plaçant les vis dans les trous (prévu à cet effet)
- Placer le bras arrière (sans écriture) à l'extérieur de l'assise en l'insérant dans les vis du premier bras.
- Placer les deux molettes noires pour resserrer les deux bras

Sécurité

- Lors d'un transfert, toujours se placer à l'arrière de la bécasine pour éviter un basculement
- Un bras peut être dévisser pour permettre un transfert plus accessible sur la bécasine

Pour plus d'informations : <https://handisport-aveyron.fr/accueil/le-comite/#materiel>

Ou contactez-nous :

06 32 05 34 80 / 06 47 32 93 05
cd12@handisport.org